


(LBM)³	GCS DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM)³	R1-b-B-ENR 02
Date d'application : 2023-11-13	CHOIX DES TUBES POUR LA REALISATION DES ANALYSES	Version : 14

Nom de l'analyse	Type de tube	OBSERVATIONS
BIOCHIMIE		
Acide urique Albumine ALAT (TGP) ASAT (TGO) Alcool Bilirubine totale et conjuguée B HCG Calcium Chlore (Cl) Créatine kinase (CPK) Créatinine Clairance de la créatinine CRP Fer Ferritine GGT (gamma GT) Haptoglobine LDH Lipase Magnésium Myoglobine NT pro BNP Potassium (K) Phosphatases alcalines Phosphore Protides Reserves alcalines (CO2) Sodium (Na) Transferrine Troponine Urée		1 TUBE BIEN REPLI POUR 20 ANALYSES
Glycémie		1 TUBE
Cholesterol total Cholesterol HDL Triglycerides	 	1 TUBE
Immunoglobulines IGG, IGA, IGM Electrophorèse des protéines sériques Immunofixation sérique		1 TUBE
Gaz du sang Cooxymétrie (CO) Méthémoglobine Lactate		1 SERINGUE ou 1 CAPILLAIRE
Ammoniac (NH3)	 	1 TUBE Prélèvement sans garrot Mettre 1 tube <u>dans une pochette réfrigérée</u> juste après le prélèvement et l'apporter <u>immédiatement</u> au laboratoire, et prévenir.
Procalcitonine (PCT)		1 TUBE
Hémoglobine glyquée (hémoglobine A ₁ C)		1 TUBE

Nom de l'analyse	Type de tube	OBSERVATIONS
BIOCHIMIE URINAIRE		
Potassium urinaire Sodium urinaire Chlore urinaire Créatinine urinaire Urée urinaire Immunofixation urinaire Microalbuminurie Protides urinaires Glucose urinaire	 ou 	1 Pot
Calcium urinaire Phosphore urinaire	 ou 	1 Pot SUR URINES DE 24 HEURES A PRÉLEVER SUR ACIDE CHLORHYDRIQUE 6M
Drogues urinaires		1 Pot
MEDICAMENTS		
Lithium		1 TUBE Renseigner le traitement, la posologie, la date et heure de la dernière prise
Digoxine Paracétamol		1 TUBE Renseigner le traitement, la posologie, la date et heure de la dernière prise
Acide Valproïque (Dépakine) Phénobarbital Carbamazépine (Tégretol)		1 TUBE Renseigner le traitement, la posologie, la date et heure de la dernière prise
IMMUNO-HEMATOLOGIE		
Groupe sanguin Phénotype RAI		1 TUBE 2 TUBES de 500 µl POUR LES PRÉLÈVEMENTS EN MICRO MÉTHODE
Coombs direct		1 TUBE
Identification rai (EFS périgieux)		2 TUBES
HEMATOLOGIE		
Numération formule Plaquettes Réticulocytes Recherche d'hématozoaires Recherche d'anomalies morphologiques des globules rouges		1 TUBE Joindre R1-a-G-ENR 01 Demande de recherche de paludisme pour la recherche de paludisme
Plaquettes en cas d'agrégats		1 TUBE
Vitesse de sédimentation		1 TUBE
HEMOSTASE		
TP, INR TCA, TCK Fibrinogène, D.Dimères Héparinémie standard		1 TUBE Renseigner le traitement, la posologie, le mode d'administration, la date et heure de la dernière prise
Facteurs de coagulation Héparinémie HBPM (II, V, VII, VIII, IX, X)		2 TUBES

Nom de l'analyse	Type de tube	OBSERVATIONS
VITAMINES		
Vitamine B12 Vitamine D Vitamine B9 acide folique sérique → 1 ^{ère} intention		1 TUBE
Vitamine B9 acide folique Erythrocytaire → 2 ^{ème} intention si folates sériques bas ou douteux		1 TUBE
MARQUEURS TUMORAUX		
ACE (antigène carcinoembryonnaire) AFP (alpha foeto protéine) Ca 19-9		1 TUBE
PSA total / PSA libre		1 TUBE
Ca 15-3 Ca 125		1 TUBE
SEROLOGIE		
CMV EBV (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) Hépatite A (IgM) Hépatites B (Antigène HBs, anticorps anti HBc, anticorps anti HBs) Hépatite C HIV Lyme Rubéole Syphilis Toxoplasmose		1 TUBE POUR 1 OU 2 ANALYSES 2 TUBES POUR 3 A 5 ANALYSES 3 TUBES AU DELÀ DE 5 ANALYSES
HORMONOLOGIE		
FSH LH Oestradiol Progestérone Prolactine		1 TUBE
TSH T3 T4		1 TUBE
Beta 2 microglobuline		1 TUBE
Cortisol		1 TUBE

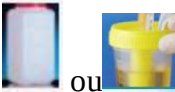

Sous traité au laboratoire Cerba



Réalisation sur le site de Langon



Réalisation sur le site de Marmande



Si une analyse ne se trouve pas dans tableau ci-dessus, faire la recherche dans le manuel de prélèvement en ligne (Viskali) pour savoir sur quel tube prélever.